





## Gebrauchsanweisung

Produktbezeichnung	Lucia blau /grün, Wachs
Indikation	Rohling aus Wachs zur Verarbeitung in einer Fräsmaschine. Geeignet für die Herstellung von Gerüsten für Guss-, Press- oder Überpressverfahren.
Phys. Eigenschaften	Form: Fest Schmelztemperatur: Nicht bestimmt Flammpunkt > 220°C Dichte: Nicht bestimmt Löslichkeit im Wasser: Nicht bestimmt
Farbe	blau, grün
Bestückung der Fräsanlagen	Nach Angaben des Fräsanlagenherstellers. Der Anwender muss sicherstellen, dass sich der Rohling fest und sicher einspannen lässt.
Bearbeitung	Geeignet für die Weiterverarbeitung in Guss-, Press oder Überpressverfahren; dabei muss auf die Herstellerangaben des jeweiligen Materials geachtet werden, in welchem das Gerüst vergossen oder gepresst wird. Das Wachs verbrennt rückstandslos.
Warnhinweise	Bei der Verarbeitung persönliche Schutzkleidung (Mundschutz, Schutzbrille) tragen, beim Bearbeiten Absaugung benutzen. Kein Medizinprodukt; nicht für den Einsatz im Mund geeignet.
Lagerung	<25°C, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften
	<b>Vertrieb durch:</b> <b>Metaux Precieux Dental GmbH</b> Lindenspürstr. 20 D-70176 Stuttgart Telefon +49 (0) 711 69 330 430 Telefax +49 (0) 711 69 330 431 info@mp-dental-gmbh.de www.mp-dental-gmbh.de
	<b>Organical CAD/CAM GmbH</b> Ruwersteig 43 12681 Berlin Telefon: +49 (0)30 549934 200 Telefax: +49 (0)30 543784 32 organical@cctechinc.com www.cctechinc.com